



1. Tryk på Lågabner knappen (push)
2. Fjern tøjet fra patientens brystkasse
3. Åben elektrodepakken og fjern folien fra bagsiden af elektroderne og påsæt disse som vist på tegningerne på elektroderne. (Sæt evt. elektroderne i stikket hvis ikke allerede de er monteret)(Er patienten meget behåret fjernes dette med en engangsskraber hvor elektroderne skal sidde og er patienten fugtig aftørres denne)
4. Tænd hjertestarteren på den grønne knap og følg de visuelle og verbale instrukser fra hjertestarteren.

OBS: Når hjertestarteren modtages sættes batteriet i denne på bagsiden og elektrodernes stik monteres i stikket på forsiden af hjertestarteren.

Hjertestarteren er nu klar til anvendelse og der vil vises en blå cirkel i status indikatoren som tegn på at alt er ok. Hjertestarteren vil løbende udføre selvtests og give alarm hvis der skulle opstå fejl i denne og samtidig vil der vises et rødt kryds i statusindikatoren

OBS: Holdbarhed for batteri er 5 år og for elektroder 30 måneder. Se evt. manual for yderligere oplysninger